

# neodisher® IP Konz

Смазка (жидкость) для использования в моечных машинах, не токсично



## Свойства:

**neodisher IP Konz** - это смазка, основанная на высокоочищенных жидких парафинах, разрешенных к применению в немецкой фармакопее.

**neodisher IP Konz** добавляется в последнем ополаскивании при машинной мойке для смазки инструментов и распределяется на поверхности инструментов в виде тонкой эмульсионной пленки. Во время стерилизации остаточные частицы не приводят к смолообразованию на поверхности инструментов. Из-за содержания эмульгаторов в своем составе, не происходит интерференции при паровой стерилизации. При последующих мойках пленка снимается полностью, не оставляя следов.

**neodisher IP Konz** не применяется для обработки инструментов, которые потом стерилизуются горячим воздухом. При окончательном бактериологическом исследовании, после обработки neodisher IP Konz- вегетативного обсеменения нет.

## Области применения:

Специальная смазка для хирургических инструментов, применяется в последней стадии ополаскивания в моечных машинах.

## Применение/дозировка:

В специальных моечных машинах для хирургических инструментов:

1-2 мл/л при помощи дозирующего устройства, добавляется при последнем ополаскивании. Температура воды при последнем ополаскивании должна быть ниже 50°C.

Не рекомендуется использовать в погружной ванне из-за опасности бесконтрольного роста микроорганизмов.

Как альтернатива, может быть применен препарат neodisher IP Spray после машинной мойки.

Не смешивать с другими продуктами.

## Заключения:

Активные вещества зарегистрированы FDA (№17621,177120,172878)

Отчет по токсикологическому профилю по запросу.

Соответствует токсикологической безопасности (EN ISO 10993-1)

## Технические данные:

Удельная масса (20°C):

0,9 г/см<sup>3</sup>

Вязкость (концентрат 20°C):

< 50mPas

## Состав:

Составляющие в соответствии с рекомендациями ЕС для моющих и чистящих средств 89/542/EWG:

15-30% неионогенные ПАВ

> 30% алифатические углеводороды (парафиновое масло DAB), консервант

## СЕ-стандарт:

**Neodisher IP Konz** соответствует закону о медицинских продуктах, согласно Европейскому руководству 93/45 ЕС

## Информация по хранению:

Не замораживать, при температуре ниже 10°C, может выпадать обратимый осадок.

Срок годности - 2 года, при соблюдении условий хранения.

## Меры предосторожности и советы по технике безопасности:

Классификация и маркировка в соответствии с Законом изготовления опасных веществ 99/45/ЕС для поставляемых концентратов.

Надо отметить что данные советы по технике безопасности распространяются именно на работу с концентратом.

### Советы по технике безопасности:

**S 26**

- При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу