

# neodisher<sup>®</sup> MA Dental

Порошкообразное среднещелочное моющее средство для использования в машинах для мойки стоматологического инструмента.



<b>Свойства:</b>	<p><b>neodisher MA Dental</b> среднещелочное моющее средство, обладает хорошей моющей и эмульгирующей способностью по отношению к крови, белкам и остаткам костей, а также к мазям и пастам. Инструменты и принадлежности сделанные из нержавеющей стали, а также лотки не подвергаются коррозии растворами neodisher MA Dental.</p> <p>В случае анодированных объектов снижается агрессивное воздействие умягченной воды на слой анодированного алюминия.</p> <p>Заявленный уровень защиты материала достигается благодаря мойке при помощи neodisher MA Dental, также он прекрасно подходит как моющее средство для программ мойки включающих термодезинфекцию.</p>
<b>Области применения:</b>	Мойка стоматологического инструмента в моечных машинах для стоматологических и ортодонтологических клиниках, а также в частной стоматологической практике.
<b>Применение/дозировка:</b>	<p><b>neodisher MA Dental</b> может использоваться с водой любой жесткости. Использование в машинах для мойки стоматологического инструмента: 3 г/л используя соответствующие дозирующие системы или вручную.</p> <p>После использования раствор neodisher MA Dental необходимо смывать подходящими ополаскивателями.</p> <p>Не смешивать с другими средствами.</p>
<b>Определение концентрации:</b>	Фактор титрования: 0,63 (по методике титрования neodisher).
<b>Технические данные:</b>	Объемная плотность: 1,015 – 1,065 г/л Уровень pH (3 г/л в деионизированной воде): около 11,5
<b>Состав:</b>	Составляющие в соответствии с рекомендациями ЕС для моющих и чистящих средств 89/542/EWG: <5% неионогенных ПАВ >30% фосфатов
<b>СЕ-стандарт:</b>	neodisher MA Dental следует требованиям законодательства для медицинского оборудования в соответствии с европейскими директивами 93/42/ЕС.
<b>Информация по хранению:</b>	Храните контейнер плотно закрытым. Продукт чувствителен к влажности. Срок хранения 2 года.
<b>Меры предосторожности и советы по технике безопасности:</b>	<p>Классификация и маркировка в соответствии с Законом изготовления опасных веществ 99/45/ЕС для поставляемых концентратов.</p> <p>Символ опасности <b>C</b> – едкий</p> <p>Содержит: метасиликаты натрия и калия</p> <p><b>Указания об опасности:</b></p> <p><b>R 34</b> - Причиняет ожоги</p> <p><b>Советы по технике безопасности:</b></p> <p><b>S 22</b> - Не вдыхать пыль <b>S 26</b> - При попадании в глаза немедленно промыть большим</p>

# neodisher<sup>®</sup> MA Dental

Порошкообразное среднещелочное моющее средство для использования в машинах для мойки стоматологического инструмента.



**S 28**

количеством воды и обратиться к врачу  
- При контакте с кожей немедленно промыть большим количеством воды.

**S 36/37/39**

- Использовать соответствующую защитную одежду, перчатки, очки/маску.

**S 45**

- При недомогании или несчастном случае немедленно обратиться к врачу, (по возможности предъявить этикетку).