

neodisher[®] MediClean

Моющее средство (жидкость) для использования в моечных машинах



Свойства:	neodisher MediClean моющее средство с очень низким воздействием на окружающую среду, со слабыми основными компонентами, которые тем не менее обеспечивают хорошие моющие свойства и низкое пенообразование. neodisher MediClean удаляет засохшую и денатурированную кровь, а так же остатки крови, которые запеклись после применения дезинфектантов, и то же время обладает мягким действием на материалы. Нержавеющая сталь, инструментальная сталь, оптика, пластик, материалы, пригодные для анестезиологических принадлежностей, устойчивы к воздействию растворов neodisher MediClean. Анодированный алюминий устойчив к воздействию растворами neodisher MediClean. Тем не менее, термическая дезинфекция и заключительное ополаскивание должно проводиться с деионизированной водой. Цветной анодированный алюминий сначала должен быть протестирован на совместимость с раствором. Если жесткость воды >5° d, то необходимо установить умягчитель воды для предотвращения образования солевых отложений и для снижения потребления препарата.	
Области применения:	Для автоматической и ручной мойки хирургических инструментов, стоматологических инструментов, включая наконечники для бормашин, уголки, эндоскопы, анестезиологическое оборудование, контейнеры и другие медицинские принадлежности.	
Применение/дозировка:	Для машинной мойки инструментов: 0,2-1,0% (2-10 мл/л) при 40-60°C Для машинной мойки гибких эндоскопов 0,5% (5 мл/л) Для ручной мойки: в погружной ванне или УЗ-мойке: 0,5-2%. Раствор менять ежедневно. В последствии, раствор neodisher MediClean должен быть достаточным количеством воды. Не смешивать в другими продуктами. При смене продукта тщательно промыть водой дозирующую систему, включая шланги. Только для профессионально использования.	
Определение концентрации:	Фактор титрования: 0,8 (в соответствии со специальной методикой для neodisher MediClean).	
Технические данные:	Удельная масса (20°C):	1,1 г/см ³
	Уровень pH (0,2-2,0% в деионизованной воде, 20°C):	8,5-9,5
	Вязкость (концентрат 20°C):	< 50mPas
Состав:	Составляющие соответствуют рекомендациям (ЕС) № 648/2004 для детергентов: < 5% анионные ПАВ 5-15% НТА, энзимы, консерванты (фенокиэтанол, метил-, этил-, бутил-, пропил-изопропилпарабен)	
СЕ-стандарт:	neodisher MediClean соответствует закону о медицинской продукции, согласно европейским директивам 93/42/ЕС.	
Информация по хранению:	Хранить в прохладном месте, но беречь от мороза. Срок хранения 2 года, при соблюдении условий хранения.	
Меры предосторожности и советы по технике безопасности:	Классификация и маркировка в соответствии с Указаниями по приготовлению опасных веществ 1999/45/ЕС для приготовления концентрата Не классифицирован	