

neodisher® SBK

Слабокислый ополаскиватель (жидкость) для использования в судно-моечных машинах



Свойства: neodisher SBK это слабокислотный ополаскиватель, с умягчающими компонентами. Благодаря высокой способности растворения известковых отложений и смачивающим способностям, судна, утки горшки прекрасно отмываются и не имеют подтеков. При использовании neodisher SBK не образуется известковых отложений ни в парогенераторе, ни в помпах.

Области применения: Применяется как ополаскиватель и умягчающий компонент в судно-моечных машинах с парогенератором для мойки суден, уток, горшков из нержавеющей стали в больницах и домах престарелых.

Применение/дозировка: Используется в судно-моечных машинах: 0,5 -1,5 мл/л, в зависимости от жесткости воды, через дозирующее устройство. neodisher SBK дозируется в парогенератор машины ли в воду при заключительном ополаскивании или в теплообменник. Необходимо обратить внимание на кислотостойкость материалов парогенератора и измерительных приборов. Для поддержания моющего эффекта, рекомендовано дозировать neodisher SBR в стадии мойки. Не смешивать с другими продуктами.

Технические данные:

| | |
|--|-----------------------|
| Удельная масса (20°C): | 1,1 г/см ³ |
| Уровень pH (0,5-1,5 мл/л в деионизированной воде, 20°C): | 3,7-3,0 |
| Вязкость (концентрат 20°C): | < 50 mPas |

Состав: Составляющие в соответствии с рекомендациями ЕС для моющих и чистящих средств 89/542/EWG:
<5% поликарбоксилаты
консерванты

СЕ-стандарт: neodisher SBK соответствует требованиям закона о медицинской продукции, согласно европейским директивам 93/42/ЕС.

Информация по хранению: Чувствителен к морозу. Срок годности 3 года, при соблюдении условий хранения.

Меры предосторожности и советы по технике безопасности: Классификация и маркировка в соответствии с Законом изготовления опасных веществ 99/45/ЕС для поставляемых концентратов.

Символ опасности: **Xi** - раздражающее

Указания об опасности:

R 36 - Раздражает глаза

Советы по технике безопасности:

S 26 - При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу

S 46 - При проглатывании немедленно обратиться к врачу, (по возможности предъявить этикетку).

Утилизировать только пустые и закрытые контейнеры.
Для утилизации остатков средства см. Карту Безопасности.