

neodisher[®] SBR extra

Моющее средство (жидкость) для использования в судномоечных машинах



Свойства:	neodisher SBR extra жидкое моющее средство с низким пенообразованием. neodisher SBR extra может использоваться в воде любой жесткости.
Области применения:	Автоматическая мойка суден, уток, горшков из нержавеющей стали в судномоечных машинах.
Применение/дозировка:	1-3 мл/л, в зависимости от жесткости воды, через дозирующее устройство neodisher SBR extra может также использоваться в подходящих типах машин для удаления известковых налетов. Не смешивать с другими продуктами. Мойка должна проводиться с использованием соответствующих предписаний, согласно RKI и закону о медицинской продукции. Только для профессионального использования.
Технические данные:	Удельная масса (20°C): 1,2 г/см ³ Уровень pH (1-3 мл/л в деионизованной воде, 20°C): 10,6-11,2 Вязкость (концентрат 20°C): <50 mPas
Состав:	Составляющие соответствуют рекомендациям(ЕС) № 648/2004 для детергентов: <5%фосфонаты, 15-30% НТА
СЕ-стандарт:	neodisher SBR extra соответствует требованиям закона о медицинской продукции, согласно европейским директивам 93/42/ЕС.
Условия хранения	Чувствителен к морозу. Срок хранения 3 года, при соблюдении условий хранения.
Меры предосторожности и советы по технике безопасности:	Классификация и маркировка в соответствии с Указаниями по приготовлению опасных веществ 1999/45/ЕС для приготовления концентрата Символ опасности: Xi - раздражающий Указания об опасности: R 37/38 - Раздражает органы дыхания и кожу Советы по технике безопасности: S 26 - При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу S 37 - Использовать соответствующие защитные перчатки S 46 - При проглатывании немедленно обратиться к врачу, (по возможности предъявить этикетку). Утилизировать только пустые и закрытые контейнеры. Для утилизации остатков средства см. Карту Безопасности.