



CIDEX®

АКТИВИРОВАННЫЙ РАСТВОР ГЛУТАРОВОГО АЛЬДЕГИДА

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВЫСОКОГО УРОВНЯ

Активированный раствор глутарового альдегида CIDEX® уже более 45 лет признан во всем мире эффективным и доступным средством для проведения дезинфекции высокого уровня гибких эндоскопов и других инструментов медицинского назначения.

ОЦЕНИТЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Раствор CIDEX®, содержащий 2,4% глутарового альдегида, прошел необходимые испытания и был сертифицирован в качестве средства для дезинфекции высокого уровня.

- Эффективный
- Экономичный
- Превосходно сочетается с различными материалами





АКТИВИРОВАННЫЙ РАСТВОР ГЛУТАРОВОГО АЛЬДЕГИДА

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- **ЭФФЕКТИВНОСТЬ** — дезинфекция высокого уровня достигается за 20 минут при температуре 20 °С (возможно многократное применение раствора в течение 14 дней, при контроле концентрации действующего вещества тест-полосками CIDEX®)
- **ЭКОНОМИЧНОСТЬ** — доступная цена доказанной эффективности.
- **СОВМЕСТИМОСТЬ С РАЗЛИЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ** — применим для широкого спектра изделий, деликатная дезинфекция снижает риск повреждения инструментов и расходы на ремонт.

СОВМЕСТИМОСТЬ С МАТЕРИАЛАМИ

Активированный раствор глутарового альдегида CIDEX® отлично совместим с различными материалами и может быть использован для дезинфекции медицинских изделий из алюминия, латуни, меди, нержавеющей стали, пластмасс, эластомеров. Более подробная информация приведена в инструкции по применению.

ХАРАКТЕР ДЕЙСТВИЯ

Активированный раствор глутарового альдегида CIDEX® обеспечивает полный спектр антимикробной активности, уничтожая бактерии, микобактерии, вирусы, грибы. Также достигается некоторое спороцидное действие при увеличении времени выдержки изделия в растворе.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

CIDEX® относится к III классу малоопасных веществ по ГОСТ 12.1.007 - 76

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ	2,4 % глутарового альдегида
ВРЕМЯ ЭКСПОЗИЦИИ	Дезинфекция высокого уровня достигается за 20 минут при 20 °С, стерилизация – за 10 часов при температуре 25 °С
СРОК ГОДНОСТИ РАБОЧЕГО РАСТВОРА	До 14 дней (после вскрытия и активации)
СРОК ГОДНОСТИ	2 года
СРОК ГОДНОСТИ ВСКРЫТОЙ КАНИСТРЫ	14 дней
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ	15...30 °С
УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ	Слив в канализацию или в соответствии с правилами, принятыми в стационаре.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

КОД ПРОДУКТА	ОПИСАНИЕ	ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА
SCX145	CIDEX®	4 канистры по 5 литров
MCX002	Тест-полоски CIDEX®	2 упаковки по 15 штук



Раствор CIDEX® также может быть использован для обработки инструментов в моечно-дезинфицирующих аппаратах, в соответствии с рекомендациями производителей.

Пожалуйста, внимательно прочтите и следуйте инструкции к препарату CIDEX®, включающей подробную информацию о растворе.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБРАТИТЕСЬ К СПЕЦИАЛИСТАМ ПО ПРОДУКЦИИ КОМПАНИИ ASP

Россия:

121614,
г. Москва,
ул. Крылатская,
д. 17, корп. 3
Тел.: +7 (495) 580 77 77

197101,
г. Санкт-Петербург,
Петроградская наб.,
д. 36, литер А, оф. 304
Тел.: +7 (812) 346-75-61

443110,
г. Самара,
ул. Лесная,
д. 23, корп. 1, офис 404
Тел.: +7 (846) 227-93-70

620014,
г. Екатеринбург,
пр. Ленина
д. 25, оф. 4.110
Тел.: +7 (343) 379-55-45

603006,
г. Нижний Новгород,
ул. Ковалихинская д. 8,
6 этаж, оф. 610, оф. 611
Тел.: +7 (831) 296-98-38

630132,
г. Новосибирск,
ул. Красноярская,
д. 35, оф. 301
Тел.: +7 (383) 230-31-01

344010,
г. Ростов-на-Дону,
пр. Буденновский,
д. 60, 3 этаж, оф. 303
Тел.: +7 (863) 204-14-73

Украина:

04070, г. Киев,
ул. Григория Сковороды,
д. 19
Тел.: +(38044) 490-64-64

Республика Беларусь:

220030, г. Минск,
ул. Мясникова д. 70,
5-й этаж, оф. 517
Тел.: +3 (7517) 226-43-33

Казахстан:

050040, г. Алматы,
ул. Тимирязева,
д. 42, оф. 23А
Тел.: +7 (727) 356-88-11

Армения:

0002, г. Ереван,
ул. Сарьяна, д. 12, офис 7
Тел.: + 8 10 (3741) 056-07-14

Грузия:

0186, г. Тбилиси,
ул. Гамрекели, д. 19
Тел.: +9 (9532) 237-77-28

Азербайджан:

1138, г. Баку,
ул. Ахмеда Джамилы,
д. 64/66
Тел.: + (99412) 510-19-64

ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS

Division of Medos International Sàrl

a **Johnson & Johnson** company

Для медицинских специалистов. Товар сертифицирован.
№ РУ: RU.77.99.21.002.E.012096.08.12 от 02.08.2012