



# CIDEZYME® XTRA

МУЛЬТИФЕРМЕНТНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО

## Быстрота. Эффективность. Основательность.

Мультиферментное моющее средство CIDEZYME® XTRA предназначено для обработки эндоскопов в автоматических установках или вручную. Средство содержит несколько ферментов, лучше проникает в наслоения биологических загрязнений и эффективно удаляет их.

### УБЕДИТЕСЬ В ПРЕИМУЩЕСТВАХ CIDEZYME® XTRA

**Мультиферментное моющее средство CIDEZYME® XTRA применяется на первом этапе очистки перед дезинфекцией высокого уровня**

- Усовершенствованный раствор с низким пенообразованием разлагается под действием микроорганизмов и легко смывается
- Содержит ингибиторы коррозии для защиты дорогостоящего медицинского оборудования и хирургических инструментов
- Легко и естественно удаляет жиры, липиды, белки, углеводы и карбогидраты





# CIDEZYME® XTRA

МУЛЬТИФЕРМЕНТНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

МУЛЬТИФЕРМЕНТНАЯ  
ФОРМУЛА

Целлюлаза, липаза, протеаза,  
амилаза и патентованные ферменты  
с расширенным спектром  
протеолитического действия

НИЗКОЕ ПЕНООБРАЗОВАНИЕ

ИНГИБИТОРЫ  
КОРРОЗИИ

БИОРАЗЛОЖЕНИЕ

## ПРЕИМУЩЕСТВА

Повышенная активность белковых протеинов обеспечивает  
быстрое и эффективное проникновение в труднодоступные места

Эффективно удаляет биологические загрязнения

Использование для ручной и автоматической обработки

Гарантирует совместимость с изделиями медицинского  
назначения

Безопасность для окружающей среды



## Совместимость с материалами

МУЛЬТИФЕРМЕНТНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО CIDEZYME® XTRA ПРОТЕСТИРОВАНО  
НА СОВМЕСТИМОСТЬ С ШИРОКИМ СПЕКТРОМ МАТЕРИАЛОВ, ИЗГОТОВЛЕНИЯ  
ГИБКИХ ЭНДОСКОПОВ, ВКЛЮЧАЯ:

латунь, медь, нержавеющая сталь, различные полимеры, резина, гофрированные трубки и пластик

## Использование в системах

ОДОБРЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ  
ЭНДОСКОПОВ (АРЭ) ENDOCLENS-NSX™, ПОДХОДИТ ДЛЯ РУЧНОЙ И АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ

ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК 4 мл на 1 литр воды

ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВРУЧНУЮ 8 мл на 1 литр воды

СРОК ХРАНЕНИЯ 18 месяцев

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 15-30°C

## СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

КОД	ОПИСАНИЕ	СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ
22591	Контейнер 3,8 л	2 X 3,8 л

Перед применением мультиферментного моющего средства CIDEZYME® XTRA прочтите инструкцию  
и следуйте ей. Инструкция содержит подробную информацию о применении препарата, а также  
о противопоказаниях и мерах предосторожности.

\* ENDOCLENS-NSX™ не имеет знака CE и не распространяется в странах Европейского союза

**ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБРАТИТЕСЬ К СПЕЦИАЛИСТАМ ПО ПРОДУКЦИИ КОМПАНИИ ASP**

### Россия:

121614, г. Москва,  
ул. Крылатская, д. 17, корп. 2  
Тел.: +7 (495) 580 77 77

191123, г. Санкт-Петербург,  
Петроградская набережная,  
д. 36, литер А, оф. 304  
Тел.: +7 (812) 346 75 61

443110, г. Самара,  
ул. Лесная, д. 23, корп. 1, оф. 404  
Тел.: +7 (846) 277 93 71

620014, г. Екатеринбург,  
пр-т Ленина, д. 25, оф. 4.110  
Тел.: +7 (343) 379 55 45/46

630004, г. Новосибирск,  
ул. Красноярская, д. 35,  
Бизнес-центр «Гринвич», оф. 301  
Тел.: +7 (383) 230 31 01

603006, г. Нижний Новгород,  
ул. Ковалихинская,  
д. 8, оф. 610, 611  
Тел.: +7 (831) 296 98 38

344000, г. Ростов-на-Дону,  
Бизнес-центр «Гедон»,  
пр. Буденновский, д. 60, оф. 303  
Тел.: +7 (863) 204 14 73

## ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS

Division of Medos International Sàrl

a **Johnson & Johnson** company