

Renovator инструмент

Моющее средство для очистки маникюрного и парикмахерского инструмента

Renovator инструмент - Средство обладает моющим, смачивающим, диспергирующим, антикоррозионным действием. Средство хорошо удаляет застарелые прочные органические отложения, способствует растворению кальциевых отложений, в том числе очищает от налетов и коррозии в результате неправильной обработки дезсредствами. Не действует на хромникелевую сталь, стекло и эмаль, резиновые уплотнения. Средство не применяется для обработки алюминия и его сплавов, оловянных и оцинкованных

Совместимость с другими материалами:

Легко смывается с поверхности, не оставляет следов и разводов. При правильном применении не оказывает отрицательного воздействия на обрабатываемые поверхности (сталь, стекло, керамика, резина, щелочестойкие пластмассы). Средство не применяется для обработки алюминия и его сплавов, оловянных и оцинкованных поверхностей.

Состав: оптимизированная смесь щелочи, специальных моющих, комплексообразующих добавок, ингибиторов коррозии.

Применение:

Для приготовления рабочих моющих растворов необходимо использовать питьевую воду, температура от 20 до 90⁰С, концентрация от 20% до 50% (в зависимости от загрязнения). Инструмент полностью погружают в емкость на 2-15 минут.

По окончании очистки инструмент промывается под струей чистой проточной воды при температуре +20...+50⁰С до полного удаления остатков средства.

Условия хранения: хранить при температуре не ниже 0⁰С и не выше +35⁰С, не подвергать непосредственному воздействию солнечного свет. Срок годности 2 года.

Техника безопасности:

Работать с препаратом должен обученный персонал, необходимо использовать спецодежду, перчатки.