neodisher® MediZym

Жидкое рН-нейтральное моющее средство, для использования в специальных моющих машинах.



Свойства: neodisher mediZym – это полностью безопасное для окружающей среды pH-

нейтральное моющее средство с ферментами и другими моющими добавками. Высохшие загрязнения а также свернувшаяся кровь удаляется при помощи neodisher mediZym прекрасно без малейшего вреда для материалов из которых изготовлен

инструмент.

Нержавеющая сталь, инструментальная сталь, легкие металлы, стекло, пластик и

материалы оборудования для анестезии и гибких эндоскопов устойчивы к

воздействию рабочих растворов neodisher mediZym.

Области применения: Механическая мойка хирургического инструмента, принадлежностей для анестезии,

гибких эндоскопов, контейнеров и другого медицинского инвентаря.

Для мойки инструмента в моечных машинах: 0.2 - 1% (2 – 10 мл/л) при 40 - 50°C Применение/дозировка:

Для мойки гибких эндоскопов в моечных машинах: 0,5% (5мл/л)

Ручная мойка:

0,5 - 2%, 20 - 30мин Погружные ванны: 0.5 - 2%, 5 - 10мин У3-ванны: Моющий раствор может подогреваться до 45°C.

Рабочий раствор neodisher mediZym необходимо менять не реже, чем раз в день.

После использования раствор neodisher mediZym необходимо смывать

соответствующими ополаскивателями. Не смешивать с другими средствами.

Только для профессионального использования.

1.0 г/см³ Технические данные: Удельная масса (20°C):

7.5 - 7.8Уровень pH (0,2 - 2 мл/л в

деионизированной воде): Вязкость (концентрат 20°С):

<10мПа

Составляющие в соответствии с рекомендациями ЕС для моющих и чистящих Состав:

средств 648/2004:

<5% анионные ПАВ

Также ферменты и консерванты

(Феноксиэтанол, метил-, этил-, бутил-, пропил-, изопропиларабен)

СЕ-стандарт: neodisher mediZym следует требованиям законодательства для медицинского

оборудования в соответствии с европейскими директивами 93/42/ЕС.

Экологическая информация: Информация по neodisher mediZym состоит из био-разложимых материалов.

Хранить в прохладном месте. Предохранять от замораживания.

Срок хранения 2 года.

Меры

хранению:

предосторожности и

советы по технике

безопасности:

Классификация и маркировка в соответствии с Законом изготовления опасных

веществ 99/45/ЕС для поставляемых концентратов.

Емкости освободить от остатков продукта, утилизировать закрытыми.

Утилизация остатков- см. лист безопасности.

- г. Краснодар, ул. Товарная 2/2, офис 1, Тел./факс: + 7 8612 / 62-67-16, e-mail: info.kr@drweigert.ru
- г. Владикавказ, Холодный переулок 2, Тел./факс: + 7 8672 / 40-25-22, e-mail: info.vl@drweigert.ru

г. Санкт-Петербург, Малая Посадская 15, офис 105, Тел.: + 7 812 / 622-19-20/21, e-mail: info.spb@drweigert.ru